

パーツ販売

既存の点滴スタンドと

車イスに取付けて
「後方連結型点滴スタンド」
としてお使いいただけます。



① 車イス連結金具ユニット
TS-R

① の取り付け例※



※<注意> 点滴スタンドの
ベースサイズ、形状によつて
は取り付けられない場合があり
ます。

高さ調整可能

握りやすい形状
のハンドル



② ハンドル TS-H



③ ガートルスタンド TS-02

W345mm×D400mm×H1,200mm～H1,800mm

車イスに 後方連結型 点滴スタンド

IZUMI

業界初!
特許出願済

安全 看護師側(後方)にスタンドがあるから、
とっさの対応も素早く安全に。

快適 看護師も患者もスタンドを持つ必要がなく、
前方も視界すっきりで快適。

便利 通常使用時から車イスへ簡単連結。



IZUMI 泉 株式会社

お問い合わせは

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング
TEL.(06)6448-6141 FAX.(06)6448-6146
東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 JR東急目黒ビル15階
TEL.(03)5719-7482 FAX.(03)5719-7492

予告なく商品の仕様を変更及び販売を終了する場合があります。ご容赦下さい。



車イスでの移動時安全をキープ

後方連結で

「看護現場の声」

- 車イス用点滴棒への変更が手間
- 点滴スタンドと車イスの操作が片手となり危険
- 患者側に点滴スタンドが預けられている場合、移動中にバランスを崩す可能性があり危険



点滴スタンド導入前 (イメージ)

**快適
便利**

看護師も患者も点滴スタンドを手で持つ必要がなく、安全・快適。

安全の3点支持連結

ハンドルと足下でワン・ツー簡単連結。

1 2 3

1・2 ハンドルに引っかけるだけでしっかりクランチ

3 車イスのフレーム支柱を下からくわえ込みガッチリ固定

快適操作

輸液ポンプなども看護師側から操作しやすい位置に設置

安全設計

段差も安全に乗り越えられる設計

掛けやすい外れにくい

使いやすい輸液フックの形状

高さ調整可能

握りやすい形状のハンドル
使う人に合わせた高さにセット可能

すいすい

車イスへの後方連結時も看護師のスムーズな歩行性をキープ

患者の歩行もスムーズ

コンパクト

スタッキング設計で省スペース収納

